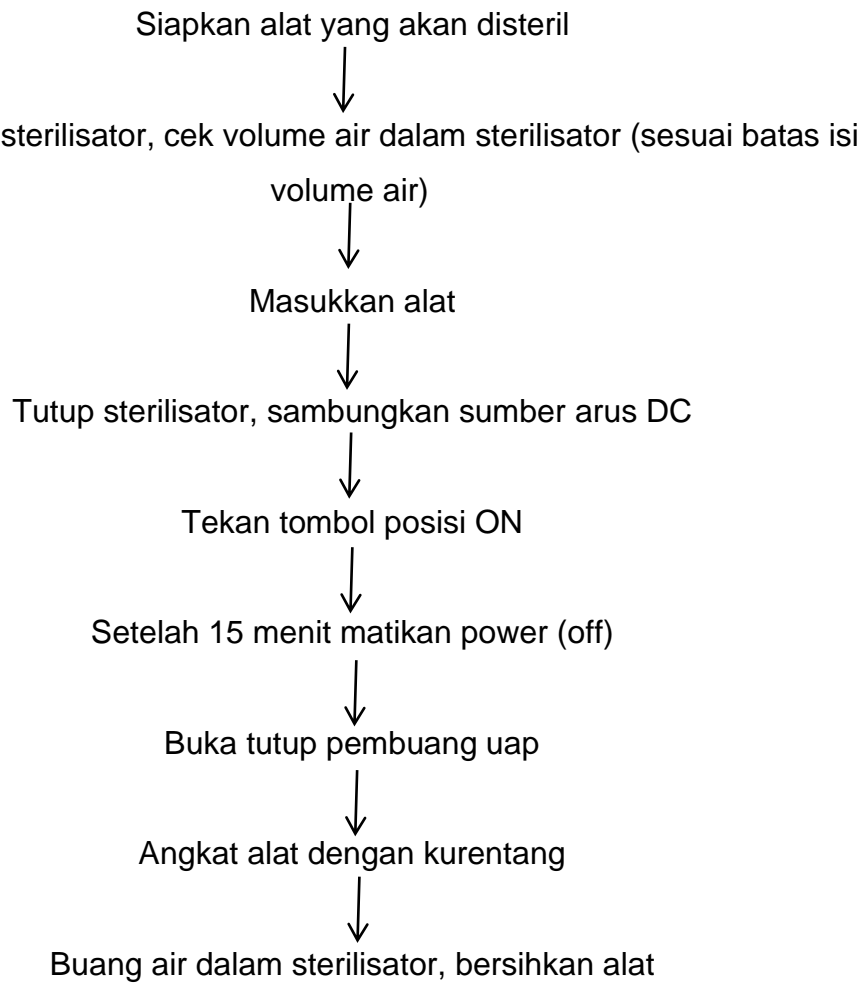

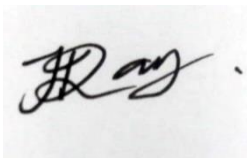
	INSTRUKSI KERJA				Disahkan
					  (Ismalayani, SKM, M.Kes)
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman	Ketua Jurusan
Kode Distribusi	009	01	10/10/2 022	1 dari 3	
IK : AUTOKLAVE LISTRIK (LINA W&H)					

1. Lingkup kerja penggunaan alat :
 - a. Alat ini digunakan untuk sterilisasi alat praktik klinik gigi
 - b. Digunakan untuk Proses Belajar Mengajar di Laboratorium Klinik.
2. Ketrampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional):
 - a. Mengetahui prinsip kerja autoclave.
 - b. Memahami persyaratan suhu sterilisasi basah (dipanaskan pada suhu 121 ° C – 134 ° C, tekanan 1 atmosfer, selama 15-20 menit).
3. Langkah-langkah kerja penggunaan alat :
 - a. Siapkan bahan/alat yang akan disterilkan.
 - b. cek volume air dalam sterilisator (minimal sampe lampu pada tanda MIN hilang atau sampe lampu tanda MAX menyala).
 - c. Jika air kurang masukkan air yang sudah disuling (air distiler) atau aquadest melalui pipa. Lalu klik tombol PUMP . air akan masuk dengan cara system pompa.
 - d. Masukkan alat Masukkan bahan/alat yang akan disterilisasi.
 - e. Tutup autoclave, sambungkan arus ke DC
 - f. Pilih mode 121 ° C
 - g. Tekan tombol posisi ON.
 - h. Tunggu hingga selesai, autoclave akan mati/stop dengan sendirinya
 - i. Buka tutup pembuang uap.

- j. Angkat alat dengan kurentang. Buang air dalam sterilisator, bersihkan alat.
- k. Keluarkan keringkan sisa air distriliser dengan memasang pipa pada saluran autoclave dibagian belakang, putar keran ke arah kiri (berlawanan arah jarum jam), tunggu hingga kering.
- l. Cabut colokkan stop kontak dari aliran listrik

ALUR :



Disusun Oleh	Diverifikasi Oleh
PLP Laboratorium  Andrey Sastrawijaya, SKG NIP.199305312019021001	Kepala Laboratorium  Ngurah Ray, SKG NIP.199309092019021001



CE
0051

LINA ENG - Rev. 6