
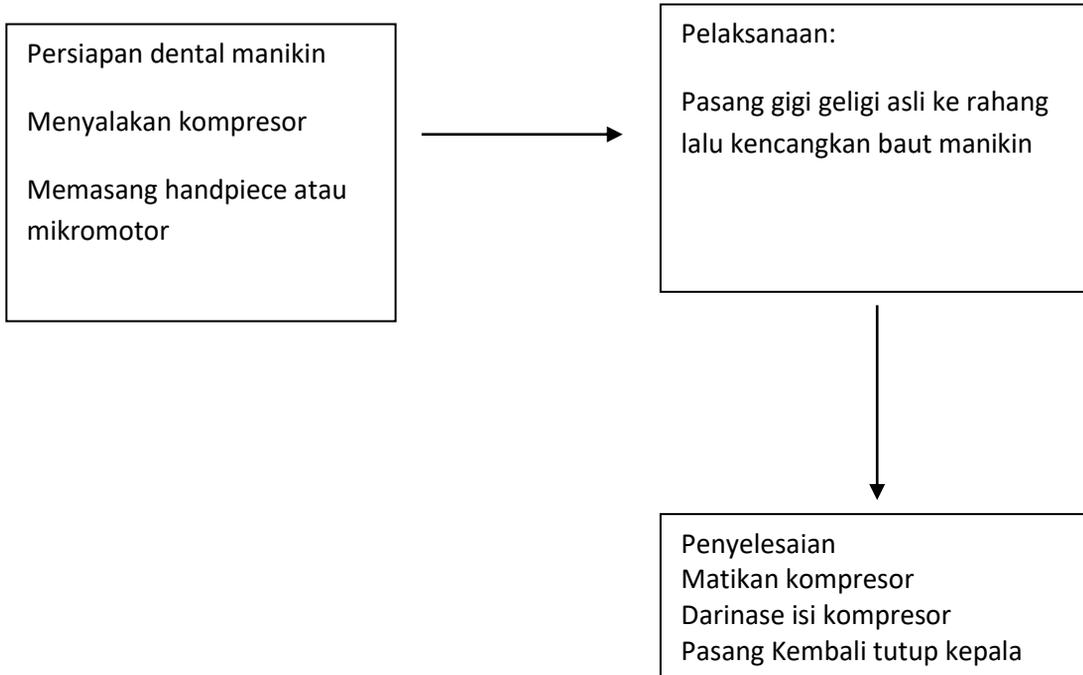


	INSTRUKSI KERJA				Disahkan
					 (Ismalayani, SKM, M.Kes)
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman	Ketua Jurusan
Kode Distribusi	012	0	17/09/2022	1 dari 2	
INSTRUKSI KERJA : DENTAL SIMULATOR MANIKIN					

1. Lingkup kerja penggunaan alat :
 - a. Digunakan untuk simulasi praktik restorasi gigi (penambalan gigi).
 - b. Bisa juga digunakan untuk PBM mata kuliah lainnya. (contoh : exo -> posisi pasien)
2. Keterampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional):
 - a. Mengetahui prinsip kerja dental manikin
3. Langkah-langkah kerja penggunaan alat :
 - a. Buka Penutup yang ada di phantom
 - b. Sambungkan stop kontak kompresor (kompresor diletakkan di tempat terpisah)
 - c. Dorong tuas yang ada disamping kanan kepala ke arah depan untuk melepaskan rahang dari kepala
 - d. Kendurkan baut yang ada di rahang bawah untuk melepas rahang bagian bawah
 - e. Putar baut yang ada di rahang atas untuk melepas rahang atas
 - f. Setelah gigi geligi asli terpasang di rahang pasang kembali rahang dan kencangkan baut
 - g. Tutup kembali kepala manikin dengan penutup yang telah disediakan jika sudah selesai praktik. Jangan lupa bersihkan bagian rahang manikin dari residu/ sisa preparasi

Diagram Alur

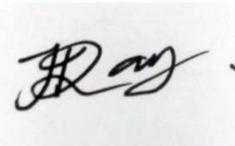

Disusun Oleh	Diverifikasi Oleh
PLP Laboratorium  Andrey Sastrawijaya, SKG NIP.199305312019021001	Kepala Laboratorium  Ngurah Ray, SKG NIP.199309092019021001

