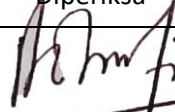

	<b>INSTRUKSI KERJA</b>				Diperiksa	Disahkan
					 (Nurbaiti, S.Pd)	 ( Ismalayani, SKM, M.Kes)
	No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman	Ka Sub Unit Lab	Ketua Jurusan
Kode Distribusi	013	0	21 /09/202 3	1 dari 2		
<b>INSTRUKSI KERJA : ULTRA SONIC SCALER</b>						

1. Lingkup kerja penggunaan alat :
  - a. Alat ini digunakan untuk melakukan kegiatan perawatan pada pasien.
  - b. Alat ini digunakan untuk PBM Pelayanan Asuhan Keperawatan Gigi Individu, Konservasi.
2. Ketrampilan / pelatihan yang dibutuhkan untuk penggunaan alat (optional):  
Mahasiswa menguasai cara mengoperasikan alat ultrasonic scaler
3. Langkah-langkah kerja penggunaan alat :
  - a. Pastikan input tegangan sumber listrik sama dengan tegangan . Atur main switch OFF pada Ultrasonic scaler
  - b. Hubungkan konektor ultra sonic pada sumber listrik
  - c. Selang handpiece disambungkan ke tempat wadah penampungan air
  - d. Tekan tombol “switch” lalu lampu indicator ON
  - e. Periksa volume air
  - f. Pilih TIP yang disesuaikan
  - g. Atur tombol “power” dan “water” yang tepat saat digunakan
  - h. Lakukan tes dari ultrasonic sampai keluar air dari handpiece
  - i. Setiap penggantian TIP, ulaskan alkohol pada TIP yang baru maupun lama
  - j. Selesai praktik, ulaskan handpiece scaler dengan alkohol
  - k. Tekan tombol switch pada posisi OFF
  - l. Cabut konektor ultrasonic dari sumber listrik

